

NEW!

サリバチェック ラボ

GCOC

Webサービス 始めました!



申込や結果確認が
PCやスマホで

- POINT **1** いつでも!
- POINT **2** 早く!
- POINT **3** 簡単に!



サービス詳細や
利用申請は
こちらから!



Webサービス開始に伴い...

キット・報告書に変更がございます

1 検体ラベルの変更

2 報告書枚数の変更

\\ 必ず下記詳細をご確認ください //


〈Webサービス開始に伴う変更点〉

3枚綴りのQRコードラベルに変更

1

検体ラベルの変更


A

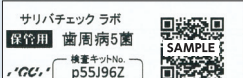

A 保管用

カルテに貼付する等、**医院様で保管**してください。


B

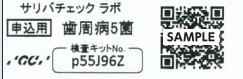

B 申込用

申込書に貼付して
検体と併せて
郵送してください。

貼付例

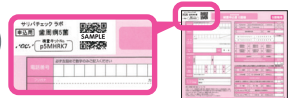

C



C 検体用

受診者名を記入し、**検体チューブに貼付**してください。

貼付例



2


報告書枚数の変更

医院様保管用報告書と患者様用報告書を統一

報告書の詳しい変更点につきましては、上記QRコードよりご確認ください。


歯周病原細菌検査

- 報告書: 1部 (2枚)
- 検査項目の解説: 1枚
- 報告書の見方: 1枚

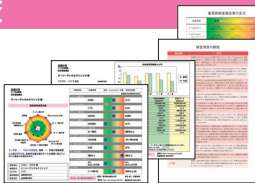

う蝕関連細菌検査

- 報告書: 1部 (1枚)
- 検査項目の解説: 1枚
- 報告書の見方: 1枚

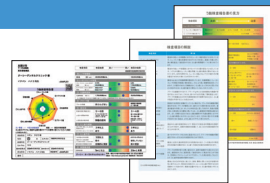

利用手順は裏面をご覧ください▶▶▶


〈利用手順〉

STEP
1

利用申請を行う

Webサービスを利用するには
初回利用時に申請が必要です。

*申請登録には**1週間ほどお時間を頂く場合**がございます。(休業日:土・日・祝)

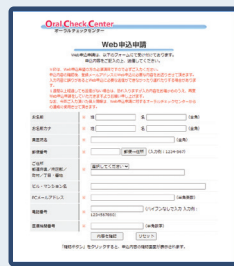

Webサービス
利用申請は
こちらから



<https://gcoc.jp/webapply.html>

STEP
2

問診情報の入力

検査申込画面で

- キットNo.**(QRコードラベル記載)
- 検体情報**
- 問診情報** を入力します。



ログインは
こちらから




<https://salivachek.gcoc.jp/clinic>

STEP
3

検体送付


- ① 検体**
 - ② 検査申込書**(未記入可)
- 2点を送付用封筒に入れ**郵送**します。

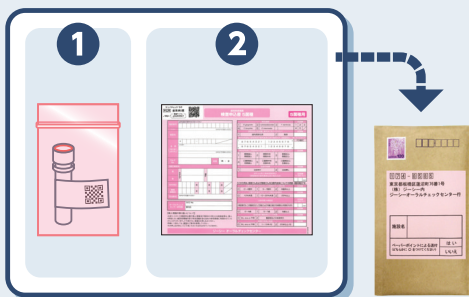

STEP
4

結果閲覧

検体到着後**6営業日**に
Web上で報告書が開覧可能になります。

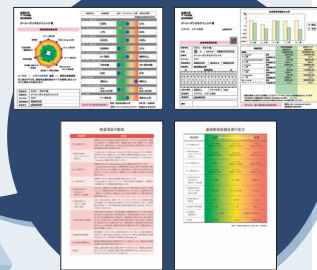

ご使用に際しては、必ず製品の使用説明書をお読みください。

株式会社 ジーシー

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間 9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
*アフターサービスについては、最寄りの営業所へお願いします。

<https://www.gc.dental/japan/>

支 店 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333 営業所 ●北海道 (011)729-2130 ●東北 (022)207-3370 ●名古屋 (052)757-5722 ●九州 (092)441-1286